

FICHA TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Desinfetante Hospitalar Meyor's é um desinfetante a base de Hipoclorito de Sódio, contendo 1% (p/p) de Cloro Ativo, com comprovada ação bactericida, próprio para uso na desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos.

Indicações: Indicado para a desinfecção de superfícies fixas hospitalares laváveis e não metálicas, tais como paredes, balcões, pisos, mesas, cadeiras e demais locais e utensílios relacionados com o atendimento à saúde pública.

Modo de Usar: Usar o produto puro. Deixar agir por 10 minutos. Esfregar e enxaguar se necessário.

Composição: Hipoclorito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água.

Componente Ativo: Hipoclorito de Sódio 10-12%.

Especificações:

Aspecto: Líquido Límpido e Transparente
Cor: Incolor

Densidade /25° C: 1,015 - 1,020 g/cm³
Teor de Cloro Ativo: 1,00 - 1,20%

Embalagens:

Bombona Plástica de 5L.

Validade: Válido por 06 meses após a data de fabricação, descrita na embalagem.

Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto na embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o frasco protegido do sol e do calor. Não misturar com produtos a base de amônia, ácidos e compostos orgânicos. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Armazenamento: Armazenar em local limpo, seco, arejado e ao abrigo do sol e do calor.